

HEXAFLUORINE®

ENSIAPU KEMIALLISSA TAPATURMISSA FLUORIVETYHAPOLLA

Pysyviä vammoja syntyy usein vain sekuntien kuluessa. Hätäsuihkulle meno ja yritys pestä aggressiivisiä kemikaaleja vedellä pois voivat viedä liikaa aikaa. Sen lisäksi vesi pystyy vain rajoitetusti laimentamaan eikä sillä ole neutraloivia ominaisuuksia, mikä tekee jatkuvan huuhtelun pitkäksi aikaa tarpeelliseksi halutun vaikutuksen saavuttamiseen. Tämän ajan kuluessa kemikaalin hyökkäys jatkuu.

Välittömällä neutraloimisella ehdimme pysäyttää kemikaalin ennen kuin se aiheuttaa pysyviä vammoja. Voimme myös kohdella hätätilassa olevaa henkilöä turvallisemmin koska vaatteetkin neutraloidaan, samalla kun se helpottaa pintojen ja materiaalin puhdistusta.

TUPLAPELASTAJA

Hexafluorine® on ainutlaatuinen huuhteluneste ensiavun käyttöön, joka on suunniteltu käytettäväksi kosketuksessa fluorivetyhapon ja sen johdannain kanssa. Se toimii kaikkia happoja vastaan, mutta tekee myös myrkyllisen fluoridi-ionin vaarattomaksi, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos sen annetaan päästä vartaloon, jossa se mm. sitoo kalsiumia. Hexafluorinen® hypertoni- sen ominaisuuden johdosta estetään myös haitallisen kemikaalin läpikäsyn ja auttaa vetämällä ulos läpäistyä kemikaalia kudoksesta.

Sen positiiviset vaikutukset ovat tieteellisesti ja käytännöllisesti todistettu Ruotsin työympäristöviraston raportissa 2010:6.


Jos epäilet, onko ensiavun hoito ollut täydellinen, tai jos huuhtelun alku viivästyy, seuraavana askeleena saattaa olla sopiva käyttää vastalääkettä kalsiumglukonaatti geelin / HF Antidote Gelin muodossa.

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI

Kalsiumglukonaattia käytetään perinteisesti sairaalassa antidoottina (vastamyrkynä) ihon altistuttua / myrkytettyä fluorivetyhapolla. Hoito antaa elimistölle lisää kalsiumia vastustaakseen epätasapainoa, joka syntyy kun fluoridi-ionit pääsevät vartaloon ja sitovat vartalon omaa kalsiumia. HUOMIO: Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin.

FLUORIVETYHAPPO

Fluoridi-ioni & hapon läpäisykyky

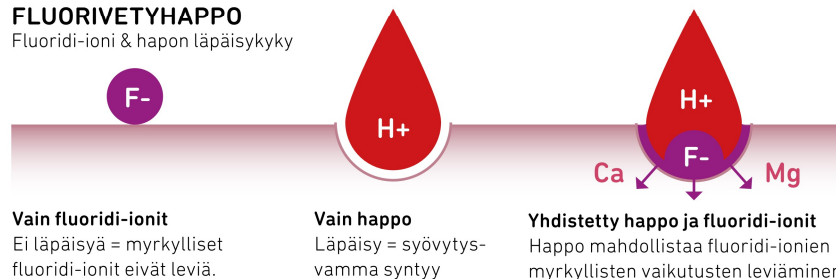

PIKAFAKTA

Kemiallisten palovammojen hoitoon, joita aiheutettiin fluorivetyhapolla.

CE CE-merkitty lääketieteellisen tekniikan tuote.

Arvostettu korvike silmä- ja hätäsuihkuun EN151543/4:n mukaan.

Tekee nopeasti syövyttävän hapon sekä myrkyllisen fluoridi-ionin vaarattomaksi.

Voi käyttää silmissä, iholla, suuontelossa sekä korvakäytävässä.

Kertakäyttöön.

Säilyy 2 vuotta.

"USEIMMAT TAPATURMAT
EIVÄT TAPAHDU, VAAN
ANNAMME NE TAPAHTUA..."



Tuote on saatavilla eri valmistusmuodoilla sopiakseen juuri sinun työympäristöösi: kannettava tai seinälle asennettuna sekä lämmityksellä tai ilman. Katso esimerkkiä seuraavalla sivulla. Lisää tietoa: www.medicalcare.se