

MEDICAL CARE SPRAY

FÖRSTA HJÄLPEN VID TERMISKA BRÄNNSKADOR, ÖGON- OCH SÅRSKADOR

Medical Care Spray är en egenutvecklad Första Hjälpen spray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador.

UPPKOMSTEN AV TERMISKA BRÄNNSKADOR

En termisk brännskada uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras.

BEHANDLING AV BRÄNNSKADOR

Genom att spraya över det skadade området med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen och skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mindre och fler droppar, desto bättre absorptionsförmåga.

BEHANDLING AV ÖGONSKADOR

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med en ögon-dusch, så att de ej skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat.

BEHANDLING AV SÅRSKADOR

Den isotona lösningen ger en skonsam sköljning och hjälper till att på ett effektivt sätt spola och hålla såret rent från smuts och bakterier.

PRODUKTEN

Medical Care Spray består av ett sprayaggregat som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kyler det skadade området, och vätskepåsar med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9%.

RIKTAD BEHANDLING

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelens minimeras risken för hypotermi.

ÖPPEN BEHANDLING

Spraydimman medför en öppen behandling, till skillnad mot värmeabsorberande förband vilka ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi, liksom då kemikalier kan vara inblandade då det finns risk att kemikalierna stängs in.

EFTERBEHANDLING AV BRÄNNSKADOR FRÅN HETA KEMIKALIER

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine® eller Hexafluorine® användas först.



SNABBFAKTA

För behandling av termiska brännskador, ögon- och sårskador.

CE CE märkt medicinteknisk produkt

Följer standarden EN15154-3/4.

Samma behandling på olycksplatsen som på sjukhus.

Medger en öppen och riktad behandling som förebygger hypotermi.

Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

“DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÄTER
DEM HÄNDA...”

MEDICAL CARE Första Hjälp

Medical Care Sköljvätska är en egenutvecklad Första Hjälp brännskadeprodukt som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för lång behandling av brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador. Den består av ett spraymunstycke som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kylvet det skadade området, och vätskepåsar med isoton steril koksaltlösning (NaCl) 0,9%. Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till eller på sjukhus.

Behandlingstid: 20 min per påse. Hållbarhet 3 år



En Första Hjälp-väska anpassad för akuta skador som bränn- sår- och ögonskador inbegriper även kemiska skador. Förbandsväskan är sydd i ett slitstarkt nylonmaterial, kan öppnas helt och vikas ut för en tydlig överblick. Innehåller 1st 200 ml sprayflaska Diphoterine Mini, 1st 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke, plåster och Första Hjälp-produkter. Inklusive vägghållare som även kan fästas i servicebil.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
21-2-20	Medical Care 1 Rescue	1st 200 ml sprayflaska Diphoterine Mini, 1st 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke, plåster, första Hjälp-produkter och vägghållare	
23-3-01R	Kit Medical Care 1 Rescue	Första förband 7,5x12 och 17x17, Små sår, Burn gel	



En Första Hjälp-väska anpassad för akuta skador som bränn- sår- och ögonskador. Väskan är sydd i ett slitstarkt nylonmaterial, kan öppnas helt och vikas ut för en tydlig överblick. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp, plåster och Första Hjälp-produkter. Inklusive hållare för vägg som även kan fästas i servicebil.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-21	Medical Care 1 First Aid	1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp, plåster, Första Hjälp-produkter och vägghållare	
23-3-01F	Kit Medical Care 1 First Aid	Första förband 7,5x12 och 17x17, Små sår, Burn gel	



En fullutrustad, portabel, damm-, fukt- och smuttsäker Första Hjälp Station för alla som arbetar inom yrken med risk för ögonbränn- och sårskador. Allt-i-ett stationen MC2 ger en optimal första hjälp-vård och snabb, effektiv lindring om olyckan är framme. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp, plåster och Första Hjälp-produkter. Inklusive vägghållare.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-02	Medical Care 2	1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp, plåster, Första Hjälp-produkter och vägghållare	
23-3-02	Kit Medical Care 2	Första förband 7,5x12 och 17x17, Idealbinda, Burn gel och skyddspaketet	



En portabel, damm-, fukt- och smuttsäker ögon- och brännskadeduschstation som har en trippleffekt. Behandlar termiska brännskador, sårtvätt. Tar bort damm och partiklar ur ögon. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp. Inklusive vägghållare. Med värmeelement för kalla utomhusklimat.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-04	Medical Care 4	1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp och vägghållare	



En portabel, damm-, fukt- och smuttsäker ögon- och brännskadeduschstation som har en trippleffekt. Behandlar termiska brännskador, sårtvätt. Tar bort damm och partiklar ur ögon. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp. Inklusive vägghållare.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-05	Medical Care 5	1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp, plåster, Första Hjälp-produkter och vägghållare	

MEDICAL CARE Första Hjälp



Utbytesprodukt till MC1, 2, 4 och 5. Behandlar termiska brännskador , sårtvätt och tar bort damm och partiklar ur ögon. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-01	Medical Care Spray	1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke	



Ögonsköljsflaska med ögonkopp som är till för att ta bort damm och partiklar ur ögon och sårtvätt. Innehåller 500 ml NaCl 0,9%.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
22-3-06	Medical Care Eyewash	500 ml NaCl 0,9%	
21-0-500	Hållare för Eyewash	Vägghållare	



Medical Care Laddtavla för placering vid truckladdningsstationer.
Laddtavlan har plats för handskar och glasögon.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
9655	Medical Care Laddtavla	Se information ovan	

21-0-500

